

# 新型コロナウイルス感染症（COVID-19） PCR検査 唾液採取キット 使用説明書

## ～採取を始める前に～


- 飲食や歯磨き、うがい直後の唾液は検査に影響を与える可能性があります。
- 飲食してから唾液採取の2時間以上は時間を空けてください。  
水は飲んでいただいて大丈夫です。
- フリスク、コーヒー、紅茶、お茶、アルコール類も避けてください。

## ■採取キットの内容



### ① 唾液を採取する


自然に分泌される唾液を喉の奥から出すようにして口に溜めます。  
容器に唾液を入れます。  
※こぼさないように入れてください。  
2ml程度 写真ぐらいの量採取します。  
唾液の量が少ないと検査できません。

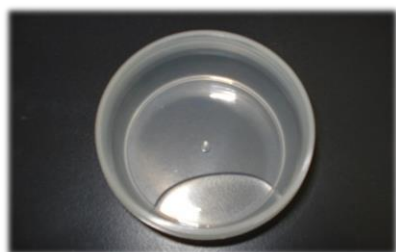

### ② キャップをしっかりと閉める

こぼれないようにキャップをしっかりと閉めます。

アルコールなどを染み込ませたペーパーなどで容器の外側を拭きます。

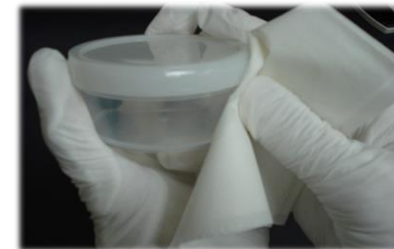

### ③ パラフィルムを巻く

蓋が緩まないようにパラフィルムを伸ばしながら巻きます。



### ④ 名前シールを貼る



### ⑤ 2重のチャック式ビニール

ビニール袋に容器を入れてチャックします。  
もう一枚のビニール袋に容器を入れてチャックします(2重袋)。  
一番外側のビニール袋に体温シールを貼ります。

